

VIKING

Bruksanvisning (SE)



1. Allmän information

Bäste kund,

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av detta hjälpmedel inkl viktiga instruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten. Det är viktigt att läsa denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Det är särskilt viktigt att läsa och följa säkerhetskraven.

REHASENSE utvecklar ständigt sina produkter och förbehåller sig rätten att ändra produkternas specifikationer och egenskaper utan föregående meddelande, om inte annat avtalats.

Vid frågor, vänligen kontakta din Rehasense Sverige direkt. Kontaktinformation finns på sista sidan i bruksanvisningen.

2. Avsedd användning, anvisningar och förbud

Avsedd användning: Rollatorn är utformad för att hjälpa personer som har svårt att stå eller gå på egen hand. Sitsen kan användas som sittytta. Andra användningsområden är inte tillåtna. Rollatorn är avsedd för inomhusbruk och utomhusbruk i miljöer där stabiliteten inte äventyras av underlaget.

Instruktioner: Rollatorn är avsedd speciellt för de personer som på grund av ett brett spektrum av behov behöver stöd under gång.

Rekommendation: En funktionsbedömning gjord av lämplig hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas före användning.

3. Leverans & allmän beskrivning

Rollatorer levereras i kartonger och viks ihop för enklare transport.

Innehåll:

- ✓ 1 rollator, hopfäld
- ✓ 1 bruksanvisning

Rollatorn "VIKING" har en ram av pulverlackerad aluminium och är utrustad med 4 hjul. Konstruktionen och låssystemet gör det enkelt att fälla ihop och låsa rollatorn i en upprätt position, för smidig förvaring och transport. VIKING är lätt att manövrera samt stabil. Körhandtagen justeras enkelt i höjd. Rollatorn är utrustad med en unik, anatomiskt formad sits för skön avlastning under färden.

4. Kvalitetsstandard

Viking rollatorn uppfyller följande europeiska standarder:

- ISO 11199-2:2021
- EU-förordning 2017/745 (MDR)

5. Säkerhetskrav

Se till att denna bruksanvisning har lästs av alla som hanterar rollatorn.




OBS!

- Brukarvikten får inte överstiga 150 kg
- Rollatorväskan får inte belastas med mer än 5 kg
- Rollatorn lämpar sig bäst på plana, jämna ytor
- Rollatorn är inte avsedd att förflyttas på i en sittande position
- Bromsarna bör sättas i parkeringsläge före och efter bruk

**VIKTIGT!**

- Använd rollatorn endast för det ändamål den är avsedd för
- Använd rollatorn endast i gott tekniskt skick.
- Konstruktiva ändringar utan skriftligt tillstånd från leverantören är ej tillåtna
- Observera risk för klämning mellan rörliga delar
- Rollatorn ska användas på stabila ytor

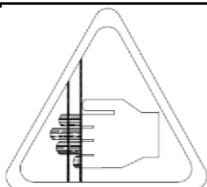

Mind Your Fingers

Notera denna symbol på rollatorn och undvik inklämning när rollatorn fälls ihop, fälls ut eller justeras. Observera avståndet mellan rollatorns delar för att undvika att klämma fingrarna eller andra kroppsdelar.

VID ALLVARLIG INCIDENT/AVVIKELSE, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER REHASENSE DIREKT. Omedelbara åtgärderna bör vidtas i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/745 om medicintekniska produkter.

6. Beskrivning**Rekommenderad brukarlängd**

Modell	Rekommenderad brukarlängd	Sitthöjd	Körhandtagshöjd
Viking M	135-170 cm	55 cm	66-86 cm
Viking L	150-200 cm	62 cm	74-102 cm

7. Användning

Leveranskontroll

Efter att ha packat upp rollatorn, kontrollera att ingående delar som beställts finns

Funktionskontroll

- Innan rollatorn tas i bruk, kontrollera att bultarna som håller fast hjulen är ordentligt fastsatta och att rollatorn är stabil
- Kontrollera bromsens funktion inkl parkeringsläge

Utfällning av rollatorn

- Ställ rollatorn upp med hjulen på golvet
- Lås upp rollatorn genom att trycka på den röda knappen
- Öppna ramen och tryck sitsrören neråt i det max utfällda läget
- Nu är rollatorn utfälld och låst



Hopfällning av rollatorn

- För att fälla ihop rollatorn, dra remmen i mitten av sitsen uppåt
- Fäll ihop ramen och pressa rören ihop för att aktivera låsmekanismen

Höjdjustering av körhandtag

- Lossa ratten under körhandtagsprofilen
- Ställ handtagen in på önskad höjd i något av de fViking lägen
- Dra åt ratten

Bromsar

- Krama bromshandtaget (så att det rör sig uppåt mot körhandtaget) för att sakta ned/stanna rollatorn
- Släpp bromshandtaget för att frigöra bromsen
- Pressa bromshandtaget neråt tills det låser sig för att aktivera parkeringsbromsen
- Krama bromshandtaget lätt uppåt för att frigöra parkeringsbromsen



Obs! Parkeringsbromsen bör aktiveras när rollatorn står still för att minska fallrisken samt undvika att den rullar bort

Sitsen

- Kontrollera att bromsarna är låsta före användning
- Sitt alltid med ryggen mot körriktningen



Varning! Lås alltid bromsarna (parkeringsläge) innan och under användning av sitsen samt före uppresning från sitsen för att undvika fall

Tillbehör

Det finns olika tillbehör till rollatorn, bl a ryggband, bricka, släpbroms, enhandbroms. Kontakta din återförsäljare för mer information.










8. Rengöring, desinfektion & underhåll

Allmänt

- Rollatorn samt tillbehör bör rengöras regelbundet/hållas i rent skick för bästa resultat
- Lättare smuts och damm kan avlägsnas med en fuktig trasa
- Hårdare smuts kan avlägsnas med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten
- Undvik slipmedel och/eller blekningsmedel
- Hjulen kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel
- Rollatorn samt tillbehör tål att tvättas i tvätt tunnel/duschkabinett/disk desinfektör max 80° i 10 min
- Vid rengöring med högtryckstvätt, undvik att rikta strålen direkt mot hjullager
- Rollatorn samt tillbehör kan ytdesinficeras med en mjuk trasa eller svamp och ett desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi avråder från desinfektionsmedel som innehåller klor eller fenol.
- Kontrollera regelbundet att hår och annat inte samlar sig mellan hjulen och gafflarna
- Insmörjning av rörliga delar kan göras emellanåt för att underhålla hjulen

9. Etikett

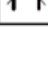Produktetiketten finns på ett av de nedre rören på huvudramen. Den innehåller följande information om produkten: namn, serienummer, tillverkningsdatum, artikelnummer, maximal brukarvikt, väskans maximala belastning, bredd, rollatorns storlek och information om tillverkaren. Ta aldrig bort etiketten från produkten.

VIKING (L)  5 907467 819303	 REHA-SENSE Sp. z o.o. Sulejowska 45 G 97-300 Piotrków Tryb. Poland	 2023-09-25  SRSIL600T  150 kg  5 kg  60 cm	HMI NR: 138673
	  (01)05907467817248(11)230925(21)0001		

10. Teknisk data

VIKING	M	L
Totalbredd öppen/hopfälld	61 cm / 23 cm	61 cm / 23 cm
Sittbredd	42 cm	42 cm
Sitthöjd	53 cm	62 cm
Höjjustering på körhandtag	66–86 cm	74–102 cm
Max. brukarvikt	150 kg	150 kg
Max. belastning av väska	5 kg	5 kg
Produktvikt utan väska	5,9 kg	6,2 kg
Bromsar	2 x handbromsar med låsfunktion	
TPE hjul (standard)	4 x 200mx35mm hjul	

11. Allmän felsökning

Problembeskrivning	Möjliga orsaker	Lösning
Svårigheter att skjuta eller styra rollatorn	Det finns smuts mellan hjulen och gafflarna	Rengör mellan hjul och gaffel. Ta bort hjulet vid behov. Smörj rörliga delar med smörjolja.
Bromsarna fungerar inte som de ska eller olika på var sin sida.	Bromsbackarna är slitna eller bromsarna är inte korrekt justerade.	Prova att justera bromsvajern eller byt ut bromsbackarna. Om detta inte löser problemet, kontakta återförsäljaren.
Ramen låses inte korrekt vid hop- och/eller utfällning	Kontrollera om modellens låsmekanism eller mottagande del inte slitits ur eller är defekt. Kontrollera även att ramen inte är skev.	Byt ut slitna eller defekta delar. Om detta inte löser problemet, kontakta återförsäljaren.

12. Transportråd

Rollatorn är lätt att fälla ihop och lätt att transportera. Det rekommenderas att fälla ihop den enligt ovan i bruksanvisningen. Rollatorn bör transporteras på ett sådant sätt att den inte rör sig plötsligt under transporten.

13. Rekonditionering och kassation

Rollatorn kan återanvändas. Innan rollatorn lämnas vidare till en annan ska den kontrolleras av kvalificerad personal.

Funktionskontroll vid rekonditionering

- Visuell inspektion av ramen
- Kontrollera samtliga muttrar, bultar och rörliga delar
- Kontrollera plastkomponenters skick
- Kontrollera hjul, gafflar och kullager
- Kontrollera bromsfunktion och skick

Skadade/trasiga komponenter ska bytas ut. Det rekommenderas att hjulen byts ut när behovet uppstår. Produkten måste rengöras och desinficeras noggrant före återanvändning.



Obs! En rollator med böjd/skev ram ska kasseras

Kassation

När produkten inte längre kan användas ska den, dess tillbehör och förpackningsmaterial sorteras på rätt sätt. Rollatorn ska lämnas till en deponerings-/avfallsstation för återvinning

14. Garanti

- Rollatorn garanteras mot tillverkningsfel 2 år från leveransdatum om inte annat avtalats
- Reservdelar och tillbehör garanteras mot tillverkningsfel 1 år från leveransdatum om inte annat avtalats
- Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning och/eller normalt slitage
- Instruktionerna för underhåll och användning måste följas
- Otillåten modifiering av produkten kommer att resultera i att garantin upphör att gälla

15. Förväntad livslängd

Produktens förväntade livslängd är tio (10) år om den används i enlighet med bruksanvisningen inkl underhåll och instruktionerna för korrekt användning. Produktens faktiska livslängd kan variera beroende på hur mycket och hur intensivt den används.

Om tekniska problem uppstår, kontakta din återförsäljare. Du kan också kontakta Rehasense® direkt.

Rehasense®

Tillverkare
Rehasense SP. SOO.
Sulejowska 45g
97-300 Piotrków Trybunalski
Polen

Rehasense Sverige
Polhemsgatan 28
39239 KALMAR
Sweden

www.rehasensesverige.se



REHASENSE