

ANVISNING RENGÖRING AV PAWS

- Kontrollera att skyddslocket till batteriet är stängt
- Vid svår nedsmutsning kan PAWS försiktigt spolras av med en vattenslang och lågt tryck. Obs! Var observant på att inte spola direkt mot batterifästet eller andra fuktkänsliga delar
- För rengöring av drivhjul rekommenderas en mjuk borste och vanligt rengöringsmedel
- Kontroller och displayen torkas av med en mjuk trasa och ev samma typ av rengöringsmedel som används till datorer och mobilskärmar
- Rengör övriga komponenter med en torr eller lätt fuktad trasa med ett mildt, på marknaden vanligt förekommande rengöringsmedel
- Kontaktpunkterna på batteriet samt dess hölje rengörs genom att torka av dem med en torr trasa
- Komponenter får aldrig rengöras med grova trasor, slipningsmedel eller starka kemiska ämnen
- Vid desinficering, använd vanligt desinfektionsmedel för hushållsbruk, utan klor och fenol, och följ rekommendationerna vid avtorkning av åtkomliga ytor
- Låt produkten lufttorka
- Spola aldrig med högtryckstvätt

CHECKLISTA VID REKONDITIONERING AV PAWS

KONTROLL	ÅTGÄRD	SIDA I SM	KLAR ✓
Automatisk klämma	Kontrollera justeringsskruv och öppnings-/stäningsfunktion. Se SM för mer information.	16	
Batteri / laddare	Rengör kontaktytor med torr trasa. Kontrollera batterisamt laddarfunktion och sladden	3	
Bredd- och höjdjustering	Kontrollera låsklämmor för breddjustering och smörj in dessa vid behov	25	
Bromsar	Kontrollera bromsfunktion (inkl handtag) och parkeringsfunktion. Justera vid behov.	11/27	
	Rengör bromsskivor med en fuktig trasa. Kontrollera att dessa varken är slitna eller gropiga.	3	
	Kontrollera att bromsvarjar varken är slitna eller rostiga	11	
	Kontrollera bromsklossarna	12	
	Kontrollera bulten. Byt skumbelägg på tetrahandtag vid behov.	28	
Display	Kontrollera att samtliga parametrar syns på skärmen samt går att ställa in (inkl körprogram). Byt vid skada.	8	
Däck	Kontrollera däcktryck och mönsterdjup. Vid mönsterdjup <1mm ska däcket bytas.	9	
Ekrar	Kontrollera att de inte sitter löst, är skadade	3	
Framlyse	Kontrollera att lampan fungerar	3	
Körning	Kontrollera motorn, gå-läge, fartkontroll, anti-spinn	28	
Manual klämma	Kontrollera justeringsskruv och klämfunktion. Se SM för mer information.	14/25	
Manual lyft	Kontrollera infästningen i lyftmekanismen och smörj in vid behov	20	
Stänkskydd	Kontrollera att stänkskyddet inte är skadat/sprucket. Byt vid behov.	9	
Stödben	Kontrollera att stödben kan fällas in/ut och att hjulen rullar.	28	
Övriga funktioner	Kontrollera signalhorns funktion.	28	